

DAL 1980

walkable®



[Home](#)

[Azienda](#)

[Plantari a lievitazione:](#)

[Diagnostica posturale](#)

[Contatti](#)

Per conoscere i punti vendita specializzati contattare
[SPONSOR →](#)

 [versione stampabile](#)

 [invia questa pagina](#)

WALKABLE ANGLE-TEST

Nell'esaminare l'assetto dei piedi di un individuo, si trascura troppo spesso di osservarne l'angolazione in appoggio.

Tale osservazione è **fondamentale** poiché una differenza dell'angolo di portamento (o di marcia) può segnalare:

- una differente distribuzione dei carichi sui due piedi, con possibile diversità nell'assetto calcaneare (un calcagno dritto ed uno valgo, oppure uno più valgo dell'altro, ecc.);
- che i piedi, per garantire al corpo una posizione di comodo equilibrio, devono posizionarsi in modo asimmetrico.


Tale condizione segnala una possibile eterometria degli arti inferiori. A tale riguardo sarà utile tenere nel debito conto anche la sola differenza dell'assetto calcaneare.

- **Compensando un'eterometria si va ad agire sull'angolazione e sull'assetto dei piedi, tendendo alla loro parificazione (causa-effetto).**
- **L'assetto del piede, per una eventuale correzione, va valutato dopo la compensazione dell'eterometria!**

Come si usa:

Si fa sì che il soggetto vada ad appoggiare i calcagni alle talloniere, e senza guardare in basso, cerchi la posizione "comoda" divaricando più o meno gli avampiedi.

La lettura dei gradi va fatta in corrispondenza della linea passante fra II e III metatarso.

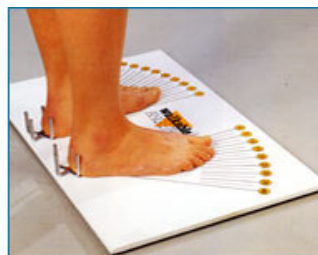

[TORNA ALLA DIAGNOSTICA POSTURALE →](#)

SPONSOR SRL

Via Feltrina Centro, 113 - 31044 Montebelluna (TV) ITALIA - Tel. +39 0423 301 771 - Fax +39 0423 601 750 - E-mail: info@sponsorsrl.it